

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS



### **Termékleírás**

Az MEDICAL Alginát sebkötszer egy steril, nem szőtt kalcium-alginát kötszer, amely gyorsan gélképző szálakból áll. MEDICAL Alginát sebkötszer Rendkívül nedvszívó, idomuló és nedves környezetet biztosít az optimális sebgyógyuláshoz. Ahogy a sebváladék felszívódik, az alginát gél képez, amely illeszkedik a sebágyhoz és elősegíti az autolitikus sebtisztulást.

### **Betegek célcsoportja**

Bármely beteg, akinél megfelelő sebtípus jelentkezik és akinél nem áll fenn ellenjavallat.

### **Javallatok**

Az MEDICAL Alginát sebkötszer közepesen vagy erősen váladékozó sebek, részleges és teljes vastagságú krónikus sebek, valamint akut sebek kezelésére javallt.

- Felfekvések
- Vénás lábszárfekélyek
- Diabéteszes fekélyek
- Műtét utáni sebek
- Kavitális sebek
- Sérülések
- Horzsolások
- Donor helyek

Az Alginát kötszerek kompressziós kötések alatt használhatók.

### **Ellenjavallatok**

Az MEDICAL Alginát sebkötszer használata nem javasolt a következő esetekben:

- Sebészeti implantáció
- Száraz sebek
- Erős vérzés csillapítására
- Azoknál a személyeknél, akik érzékenyek a kötésre, vagy korábban allergiás reakciót tapasztaltak azzal szemben

## **Óvintézkedések**

Forduljon egészségügyi szakemberhez, ha irritációt (bőrpír, gyulladás), macerációt (bőrfehéredés), hipergranulációt (túlzott szövetképződés) észlel.

Enyhén váladékozó sebek esetén a kötés hozzátapadhat a sebhez. Ha a kötés nehezen eltávolítható, nedvesítse be fiziológiás sóoldattal a levétel előtt.

A kötés nem sebészeti tamponként való használatra készült.

A kötszert nem szabad 30 napnál hosszabb ideig kumulatív módon használni.

Csak külsőleg. A kötést egészségügyi szakember felügyelete mellett kell használni .

Bármely súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

### **Helyszín előkészítése**

- Szükség esetén végezzen debridementet, majd öblítse/tisztítsa meg a sebfelületet a szabványos protokollok szerint.
- Távolítsa el a felesleges oldatot a környező bőrről.

### **Kötszer méret kiválasztása**

Válasszon ki egy olyan méretű MEDICAL Alginát sebkötszert, amely valamivel nagyobb a sebnél.

### **Kötszer felhelyezése**

1. Vágja (tisztá ollóval) vagy hajtsa össze a kötést a seb méretéhez igazítva. Lazán töltse ki a mély sebeket, ügyelve arra, hogy a kötés ne fedje le a seb széleit.
2. Vigye fel a MEDICAL Alginátot közvetlenül a sebágyra.
3. Fedje le és rögzítse nem záró vagy félig záró kötészögzítővel.

### **Kötéscsere és eltávolítás**

1. Az MEDICAL Alginát sebkötszer akár 7 napig is a helyén maradhat, a beteg állapotától és a váladék mennyiségétől függően. Kezdetben szükség lehet a kötés 24 óránkénti cseréjére, vagy amikor a jó sebkezelési gyakorlat előírja a kötés cseréjét.
2. Új MEDICAL Alginát sebkötszert kell használni, amikor a kötszer elérte nedvszívó képességét, vagy amikor a helyes sebkezelési gyakorlat előírja a kötés cseréjét.
3. Az újbóli felhelyezéshez óvatosan távolítsa el a másodlagos kötést. Ha a seb száraznak tűnik, az eltávolítás előtt áztassa be a kötést normál sóoldattal.
4. Óvatosan távolítsa el a kötést a sebágyról és dobja ki.
5. Új kötés felhelyezése előtt tisztítsa meg a seb helyét megfelelő sebtisztítóval.

### **Ártalmatlanítás**

A kötést a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

### **Tárolás**

Hűvös, száraz helyen tárolandó.

**Ne használja fel újra , az ismételt felhasználás súlyos fertőzést okozhat.**

**Ne sterilizálja újra.**

**Ne használja, ha az egyes tasakok sérültek/fel vannak nyitva.**

**A termék minőségmegőrzési ideje a csomagoláson van feltüntetve.**



Foshan United Medical Technologies Kft.

No.1 Huixing Road, Yanbu, Dali, Nanhai, Foshan, Guangdong tartomány, 528247, Kína

Weboldal: [www.umtmedical.com](http://www.umtmedical.com)



Medwheat Tech Service GmbH

Max-Planck- Straße 4 85609 Aschheim b. München, Németország

### **UKRP**

United Medical Innovations Kft.

4. iroda, Market Square 19, Sandbach, Cheshire , CW11 1AT, Egyesült Királyság

Verzió: 6

Felülvizsgálva: 2024. október

### **A CÍMKÉZÉSEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK**

Tekintse meg a használati utasítást, vagy tekintse meg az elektronikus használati utasítást



Egyszeri használatra



Ne sterilizálja újra



Minőségét megőrzi: év, hónap és nap



Besugárzással sterilizálva



Termékreferencia



Gyártási tételszám



Figyelem, lásd a használati utasítást.



Nem tartalmaz latexet



Tárolási feltételek



Gyártó



EU képviselő



CE-jelölés



Tartsa távol a napfénytől



Száraz helyen tárolandó



Ne használja, ha a csomagolás sérült és olvassa el a használati utasítást



Gyártási dátum



Orvostechnikai eszköz



Egyedi eszközazonosító



Egyszeres steril védőcsomagolás



Felelős személy az Egyesült Királyságban

**UKRP**